

کد B-04-212	فرم	
	کنترل کیفی نوار اداری	

شامل کنترل کیفی نوارهای اداری، دستگاه رفرکتومتر، سرعت چرخش و زمان سانتیفریوژ، استفاده از معرف های دارای تاریخ مصرف و شیوه جمع آوری ادرار می باشد.

برای اطمینان از کیفیت جوابدهی نوارهای اداری و دستگاه رفرکتومتر می توان اقدام به تهیه ادرار مصنوعی با مقادیر گوناگون آنالیت های مورد سنجش کرد. برای این منظور ادرار با کنترل پایین، کنترل بالا و کنترل منفی تهیه می شود.

کنترل منفی	کنترل بالا	کنترل پایین	
۵ گرم	۱۰ گرم	۵ گرم	کلرور سدیم
۵ گرم	۱۰ گرم	۵ گرم	اوره
-	۰/۵ گرم	۰/۵ گرم	کراتینین
-	۱۵ گرم	۳ گرم	گلوکز
-	۳۵ سی سی	۵ سی سی	آلبومین گاو
-	-	۱۰۰ میکرولیتر	خون کامل
-	۲ سی سی	-	استون
-	۵ سی سی	۵ سی سی	کلروفورم
۱۰۰۰ سی سی	۱۰۰۰ سی سی	۱۰۰۰ سی سی	آب مقطر

وزن مخصوص	خون	کتون	گلوکز	پروتئین	PH	
۱/۰۰۹	متوسط	-	+۲	+۳	5	کنترل پایین
۱/۰۲۶	-	اندک تا متوسط	+۳	+۴	6	کنترل بالا
۱/۰۰۶	-	-	-	-	5	کنترل منفی

*کنترل کیفی وزن مخصوص ادرار:

۲/۰۲۹ گرم پودر پتاسیم سولفات را در آب مقطر حل کرده و حجم را به یک لیتر برسانید. این محلول دارای وزن مخصوص ۱/۰۰۹ می باشد